

特急検便検査 お客様注意事項（必ずご一読ください）

【検査項目について】

一般項目セット	赤痢菌・サルモネラ菌※1・O-157
腸管出血性大腸菌セット	赤痢菌・サルモネラ菌・O-157、O-26、O-111、O-128
ノロウイルス検査 EIA法	ノロウイルス抗原を検出し、ウイルスの有無を調べます。※2
ノロウイルス検査 PCR法	ノロウイルスの遺伝子を同定し、ウイルスの有無を調べます。※3

※1 サルモネラ菌は腸チフス、パラチフス A 菌及び一般のサルモネラ菌を検査します。

※2 ウイルスが少量である場合は検出できないこともあります。

※3 検出限界が低く、少ないウイルス量でも検出可能です。

【報告書形式に関する注意点】

◎2名以上でお申込みいただいた場合、報告書は「一覧報告書」となります。

⇒「一覧報告書」とは、会社もしくは団体の受検者様全員の検査結果が1枚に記載された報告書です。

◎1名でお申込みいただいた場合、報告書は「個人報告書」となります。

◎報告書発行後の社名変更、受験者様名変更などはお受けできません。

【報告書納期に関する注意点】 検査ラボ到着日を起算日とした目安です

◎報告書速報は陰性の結果の場合、3営業日前後でFAXでお送り致します。

メールでの報告をご希望の場合は、WEBからのお申し込みが必要となります。

◎陽性の結果が疑われた場合、さらに1～2日検査にお時間をいただく場合がございます。

◎報告書原本は速報をお送りしてから2～3日で郵送でお手元に到着予定です。

◎検体の状況や検査ラボの受付状況により検査にお時間をいただく場合がございます。

◎配送状況などによりやむを得ず報告書の到着が遅延する場合がございます。

【検体の送付に関する注意点】

◎検体は皆様ご一括でお送りください。

◎検査容器セット内の検査依頼書及びラベルには必ずお申込時と同じ内容を記載してください。

◎便は必ず採取してください。採取しないままご提出されますと検査結果のご報告は出来ません。

【一般項目セット・腸管出血性大腸菌セット】

◎採便後の検体は通常6日間ほど常温で保管可能ですが、採便後はなるべく早く検査ラボへご発送ください。

【ノロウイルス検査EIA法・PCR法】

◎採便後すぐに冷蔵庫で保管し、即日、遅くても翌日中には検査ラボに発送してください。

検体の発送には、必ず冷蔵便をご利用ください。

◎検体を送付する際の送料はお客様ご負担となります。

◎弊社提携先検査機関での検査となります。送付先にご注意ください。

◎土・日・祝日は検体のお受付が出来ません。到着日のご指定にご注意ください。

【検査料金に関する注意点】

◎お支払いは検査容器セット納品時にヤマト運輸配達員へ現金またはクレジットカードでお支払いください。

※代引き手数料は弊社が負担します。 ※クレジットカード払いは業務用ではご利用いただけません。

◎容器セット発送後のキャンセルは出来ません。

◎ご検査を実施されない場合でも容器が到着した時点でご料金が発生致します。

なお、ご提出いただきました個人情報につきましては、お客様のプライバシーを尊重し十分な配慮を行うとともに適正な管理を行う事に努めております。お客様の個人情報を、第三者に開示、提供、譲渡する事は致しません。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル：0120-409-929

FAX：0465-30-1731



*弊社は検査結果に限り責任を負うものであり、検査結果によって生じるトラブルまたは損害等に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。